



# Active braille, afficheur et bloc-notes braille 40 caractères pour personnes aveugles

UN afficheur et bloc-notes Braille 40 cellules qui détecte la Position de vos doigts sur la barrette Braille lors de la lecture



5 590,00 €

## Sommaire

[Présentation](#)

[Points forts](#)

[Caractéristiques techniques](#)

[Téléchargement](#)

[Produits similaires](#)

## Présentation

Active Braille est un bloc-notes pourvu de 40 cellules et d'un clavier Braille 8 touches similaires à celui de l'Actilino. Mais il est surtout le premier appareil de ce type doté de la technologie ATC® conçue par HandyTech, procédé permettant de détecter la position des doigts sur la barrette Braille. Jusqu'ici réservée aux professionnels, cette innovation apporte un réel confort de lecture, tout en ouvrant de nouveaux horizons, particulièrement sur le plan pédagogique.

Ergonomique, Active Braille est un puissant bloc-notes sur lequel vous pourrez emmagasiner des centaines d'ouvrages et de documents. En mode livres, le défilement automatique paramétrable, combiné aux fameuses cellules concaves HandyTech, procure un réel plaisir de lecture.

Simple et efficace, Active Braille dispose des fonctionnalités typiques d'un bon bloc-notes Braille. Éditeur de textes, horloge... Saisissez vos textes au moyen du clavier Braille ergonomique intégré et transférez-les à l'aide du logiciel HTCom dédié. Il pourra convertir vos documents de l'intégral vers l'abrégé et inversement par l'intermédiaire d'une rapide connexion USB.

Connecté à un ordinateur en conjonction avec n'importe quel lecteur d'écran Windows, Active Braille devient un afficheur braille confortable. Vous pourrez également l'utiliser sur votre Mac, par le biais de la connexion USB ou Bluetooth. .

Lisez différemment avec ATC®. Plus besoin d'appuyer sur la touche de défilement pour passer à la ligne suivante ! En mode Livres, ATC® détecte que votre doigt arrive en fin de ligne et passe à la suivante automatiquement pour vous. En mode PC, en conjonction

avec un lecteur d'écran, ATC® peut annoncer la lettre ou le mot sur lequel vous êtes positionnés. ceci peut par exemple être très utile pour faire prononcer correctement des mots dans une langue étrangère tout en les lisant en Braille, sans aucune intervention de votre part.

Conçu pour la mobilité, Active Braille se transporte dans un étui pourvu d'une bandoulière et adaptée à son design. Il dispose d'une autonomie de 20 heures, au moyen de piles rechargeables standard, disponibles n'importe où et que trois heures suffisent à recharger.

## Points forts

- Technologie ATC® ;
- Mode livres ;
- Clavier Braille ergonomique ;
- Fermeté des points Braille paramétrable ;
- Deux ports USB pour la connexion d'un clavier externe ;
- Fonctions internes logicielles performantes.

## Caractéristiques techniques

- 40 cellules Braille avec 40 curseurs routine ;
- Clavier Perkins ;
- Deux touches triple action ;
- 4 Go de mémoire de stockage ;
- 3 ports USB (dont un réservé pour la connexion à l'ordinateur) ;
- 20 heures d'autonomie batterie (rechargeable en 3 heures) ;
- Dimensions : 317 x 123 x 28 mm ;
- Poids : 860 g ;
- Garantie : 3 ans